


Willospan[®]

Водещото решение за хемостаза в хирургията



Willospon® е стерилен резорбируем желатинов порест материал с ОТЛИЧНИ ХЕМОСТАТИЧНИ СВОЙСТВА.

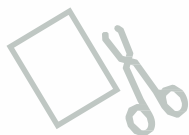

Лесна употреба

- готов за непосредствена употреба
- може да се реже до желания размер
- прилага се сух или намокрен с физиологичен разтвор



Абсорбция и резорбиране

- попива до 30 пъти собственото си тегло и само се подува леко
- при оставяне in situ се резорбира напълно до 3-4 седмици без остатък



Най-съвременна технология

- не съдържа латекс и фталати
- фармацевтичен желатин с равномерна порьозност



Поносимост

- нетоксичен, досега не се съобщават алергични реакции и други странични ефекти
- пречистен, без BSE
- неутрален pH



Спестява време

- намалява времето за хирургическата интервенция

Willospon® е в двойна опаковка, стерилизиран с гама-лъчение при 2,5Mrad (25 kGy), произведен е по ISO 13485 и е сертифициран по CE; клас III.

ОБХВАТ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание на продукта

- стерилен резорбируем порест материал, използван за контрол на сълязаци кръвотечения, когато конвенционалната хемостаза е трудна за осъществяване и когато употребата на нерезорбируеми материали е нежелателна
- двойна опаковка за хигиена на хирургическата маса, последната опаковка е във форма, готова за използване от хирурга, който може да я вземе със сухи стерилни ръкавици и/или с инструмент
- може да се прилага директно върху раната с натиск

Willoston® Standard Willoston® Special Willoston® Tampon





Willoston® Dental



КАК ДЕЙСТВА

Равномерната поръзност на Willospon® създава благоприятна среда за активация и агрегация на тромбоцитите, когато се приложи директно върху кървящата повърхност.

Механизмът на действие поражда матрица на мястото на кървенето, като активира присъщата пътека на съсирване, позволяваща възникването на съсирване. След като този процес започне, се осъществява постепенна абсорбция, хигиенична и най-вече безопасна.

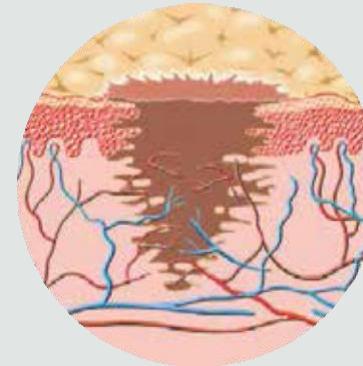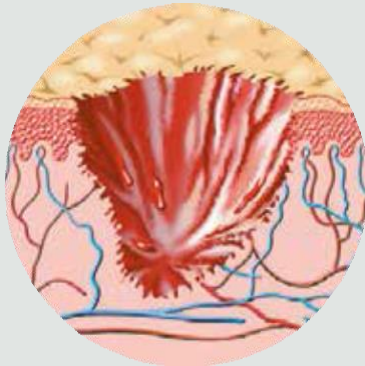


ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Обща хирургия
- Неврохирургия
- Травматология / ортопедична хирургия
- ENT хирургия
- Хирургия на сърце и гръден кош
- Дентална хирургия / лицево-челюстна хирургия
- Проктологична хирургия
- Гинекология
- Наситен с адреналин Willospon® може да се прилага дори за спиране на остро кървене в хирургията на ухото.



Willoston®

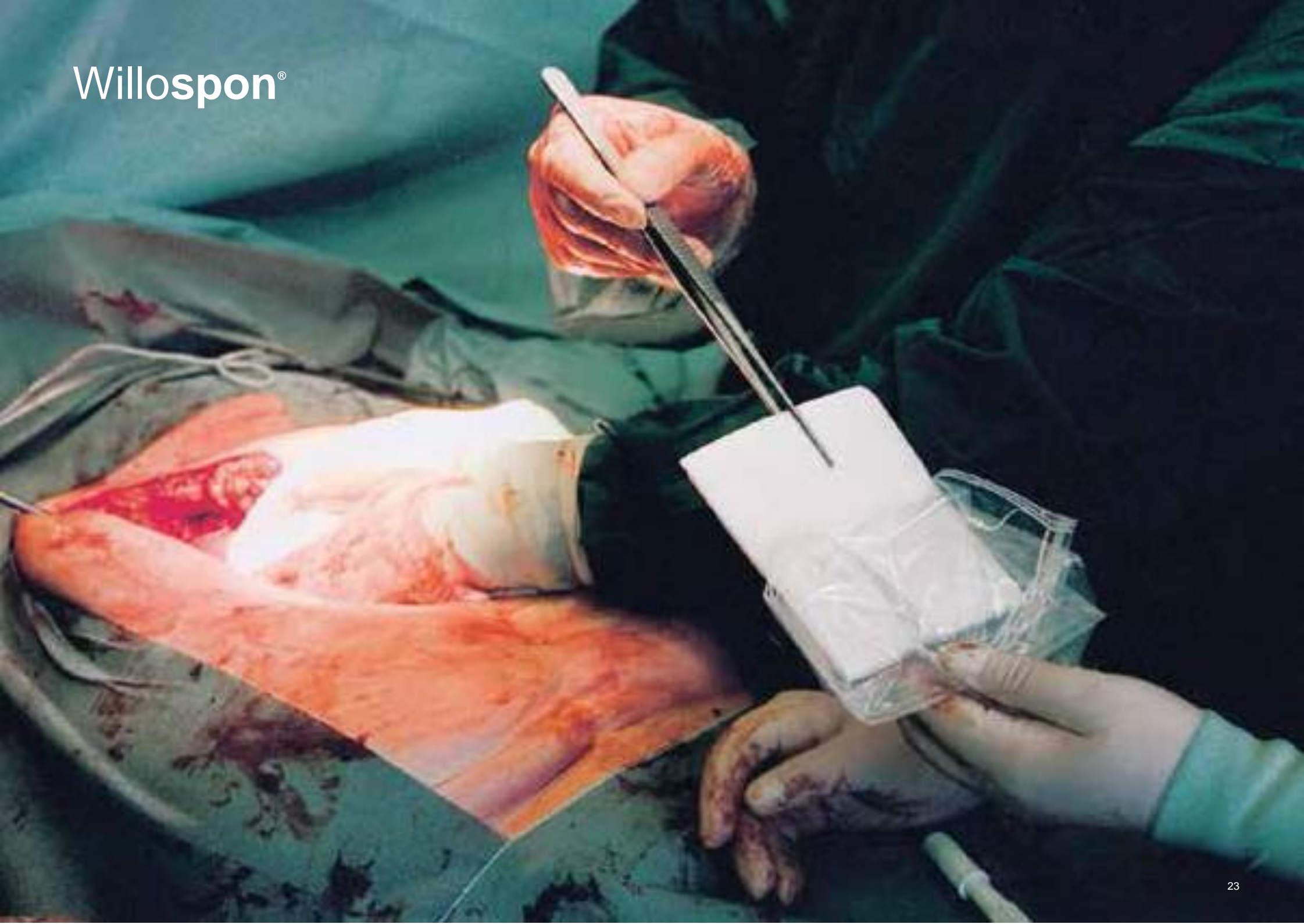

ЕТАПИ НА ОПАКОВАНЕ

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
Willoston® Standard/ Willoston® Special



Стерилна торбичка



Отворете с обелване



Втора стерилна торбичка



Отворете с обелване



Стерилната гъба е готова за прилагане


Willoston® Tampon



Стерилен съд




Отворете с обелване

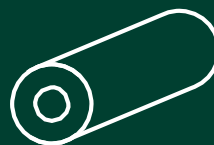


Стерилният тампон е готов за прилагане

Willoston® Dental

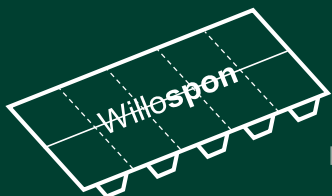

Стерилен блистер

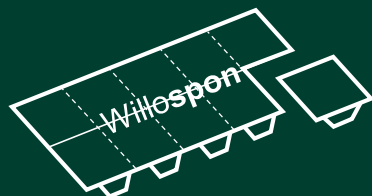

Откъснет е един съд



Отворете с обелване



Стерилната гъба е готова за прилагане

Willoston®

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

MPN	Описание	Раз	Количес
20925NL-20	Willoston® Standard	8 x 5 x 1 cm	20
20945NL-20	Willoston® Special	8 x 5 x 0.1 cm	20
21005NL-16	Willoston® Tampon	8 x 3 cm Ш	16
20966NL-50	Willoston® Dental	1 x 1 x 1 cm	5 x 10



Идентификация и проследимост:

Всеки Willospon® има UDI код и партиден номер.

Съхранение:

между 15 и 25°C, на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина

Стерилизация:

гама-лъчение, не може да се стерилизира повторно.

Изделие за еднократна употреба**Противопоказания, предупреждения и странични действия:**

Вижте инструкциите за употреба.

CE щемпел:

медицинско изделие клас III съгласно директива 93/42/CEE)

Съответства на приложимите стандарти и разпоредби Качество:

Системата за управление на качеството на Will-Pharma е сертифицирана по ISO 13485:2016.

Willospon® е регистрирана търговска марка на Will-Pharma.

Производител:

Will-Pharma BV, Beechavenue 6, 1119 PT Schiphol-Rijk, The Netherlands

Референтен документ:

Willo-BRO-Rev1

**За повече информация за
продукта:**

Beechavenue 6
1119 PT Schiphol-Rijk The
Netherlands
info@willpharma.com
www.willocare.com

WILLPHARMA

- SINCE 1924 -